

Ögondusch/sårtvätt



Vid stänk av kemikalier är det viktigt att så snabbt som möjligt påbörja spolning av ögat. Varje år sker ett stort antal olyckor på våra arbetsplatser och i våra hem Dessa olyckor ger skador som innebär alltifrån lättare irritationer till förlorad syn.

Ögonduschen är tillverkad med en speciell förpackningsteknologi, s.k. bag-in-can, som innebär att koksaltlösningen är innesluten i en mjuk, stark folie, helt isolerad från drivgasen.

Vid tömning av flaskan hålls drivgasen kvar och försvinner inte.

Du har alltid tillräckligt tryck kvar i flaskan, till sista droppen. Flaskan fungerar lika bra upprätt som upp-och-ner vilket underlättar då ögat skall spolas. Varje flaska har 8 minuters spoltid med ett tryck som är optimerat för bästa genomsköljning. Innehållet förblir sterilt trots att flaskan är använd. Produkten fungerar också utmärkt som sårtvätt samt vid avlägsnande av skräp ur ögat.

Fakta:

Innehåller steril 200 ml 0,9 % NaCl, koksaltlösning.

CE-märkt enligt MDD93/42/EEC.

Gammasteriliserad, hållbarhetstid i 3 år.

Tål placering i upp till 80 graders värme.

Som drivgas används nitrogen, miljövänlig kväve.

Tömningstid 8 minuter.

Spoltider:

SMUTS Spola tills obehaget är borta. Sök läkare om obehaget kvarstår.

SYROR Spola minst 5-10 minuter. Direkt till läkare.

ALKALIER Spola minst 15-20 minuter. Direkt till läkare